

Glucolog M


Software voor een SNEL en NAUWKEURIG
beheer van de glucosewaarden,
gedownload met de glucosemeter van :



A.MENARINI
diagnostics



GEBRUIKSHANDLEIDING GLUCOLOG LITE met dataverzending via NFC

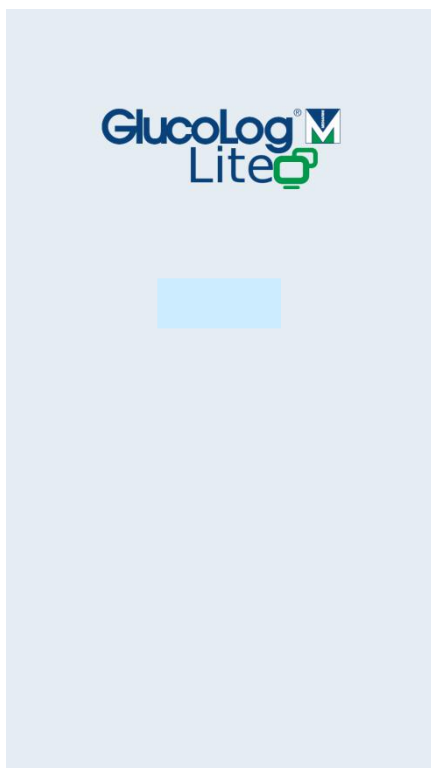

A.MENARINI diagnostics Glucolog Lite

Resultaten Dagboek

Datum	Activiteiten	Resultaat
21-06-2049 12:10		16.4 mmol/L
21-06-2049 08:37		5.9 mmol/L
21-06-2049 08:37		6.0 mmol/L
20-06-2049 12:02		7.2 mmol/L
20-06-2049 11:51		6.0 mmol/L
03-06-2015 11:54		7.2 mmol/L
21-04-2015 08:39		5.2 mmol/L
20-04-2015 11:59		5.8 mmol/L
20-04-2015 11:52		5.7 mmol/L
20-04-2015 11:51		5.3 mmol/L
20-04-2015 11:51		6.7 mmol/L

Glucose Ketonen Ontvangst Instellingen


GEBRUIKSHANDLEIDING –

App. installatie

- Zorg voor verbinding met het internet op uw gsm en ga naar uw gebruikelijke App. store
- Zoek op ' Glucolog Lite ' en download deze gratis App. op uw Smartphone
- De App. installeert zichzelf en is klaar voor gebruik
- Open nu de App.

Gegevens invullen

- Onderin de App. staan 3 icoontjes
- Ga naar het meest rechter icoon ' instellingen '
- Hier vult u uw naam en geboortedatum in
- Het **PID** hoeft **niet** ingevuld te worden
- Glucose in mmol/L en Koolhydraten in g.
- Het hoog en laag niveau is met u afgesproken
- Bij ' webserver ' hoeft u **niets** in te vullen
- De Periode tijden hoeft u niet aan te passen
- Ketonen zet u op 'nee'
- Selecteer bij ' Meter ' de **GLUCOFIX TECH**
- Selecteer bij "Type Verbinding" **NFC**

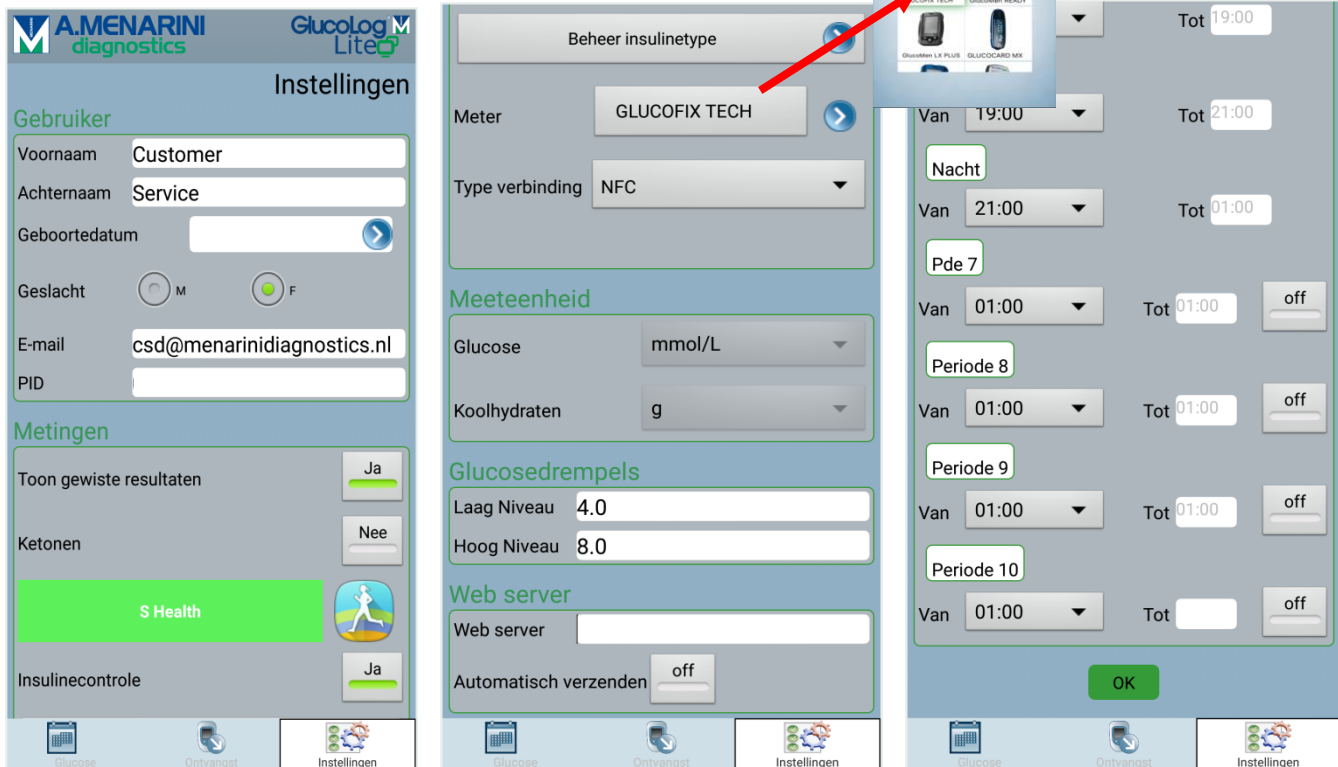




GSM waarden uitlezen


- U bent bij ' Ontvangst ' 2^e icoon onderin
- Hiermee stuurt u de waarden uit de bloedglucosemeter naar het Glucolog Lite programma
- Zet NFC aan op uw gsm (zie instellingen/verbindingen op uw GSM)
- Zorg ook dat de NFC functie op uw GLUCOFIX TECH aanstaat (zie handleiding GLUCOFIX TECH)
- Houdt de achterkant van de GLUCOFIX TECH tegen de achterkant van uw GSM (net onder de camera lens)
- De GLUCOFIX TECH gaat nu verbinding maken met uw GSM
- De eerste keer wordt u gevraagd of u de zojuist gedownloadte gegevens wilt opslaan. Tik op "JA"
- Bij '**Laatste synchronisatie**' staat de tijd & datum van de meest recent ontvangen gegevens in de App – controleer deze altijd!
- Ga nu naar "Glucose" 1^e icoon onderin. Hier treft u al uw glucosewaarden die in uw GLUCOFIX TECH zijn opgeslagen.




Verzenden via Email

- U bent bij ' Glucose ' - icoon 1 (links onderin)
- U veegt nu over het scherm van **rechts naar links**
- De onderstaande afbeelding 2 verschijnt in het scherm
- Selecteer de periode (data) welke u wilt verzenden
- Rechtsonder ziet u een groene cirkel met een '+',
- Tik op deze cirkel en u kunt kiezen hoe u de gegevens wilt versturen (e-mail of sms)
- Kies vervolgens met welke mailapp u de gegevens wilt verzenden.
- Het ingevulde email adres komt automatisch in de mail te staan (zie afbeelding 3)
- U kunt zelf nog een e-mail adres toevoegen, het onderwerp aanpassen of een tekst invoeren
- Vervolgens verstuurt u de mail

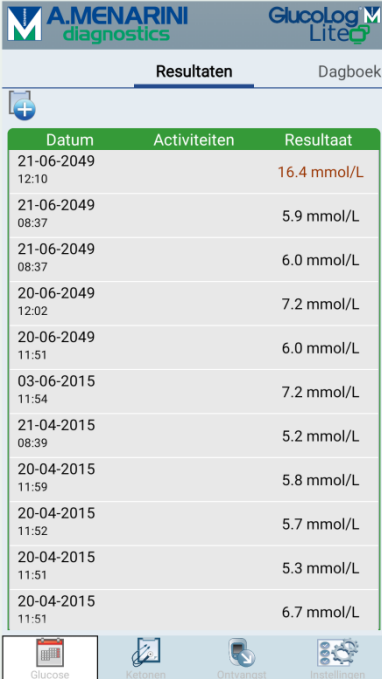
1. 

2. 

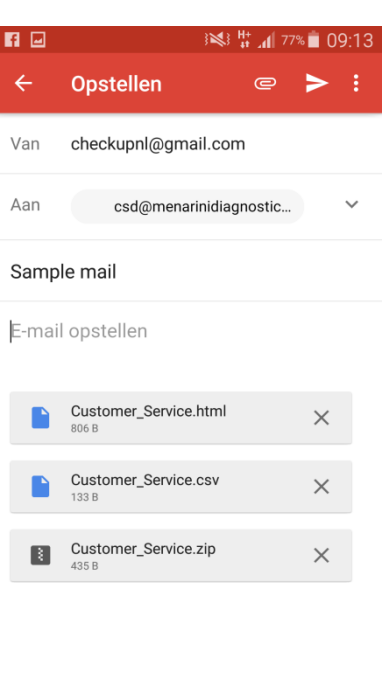3. 

Grafieken & Statistieken

- U bent bij ' Glucose ' - icoon 1 (links onderin)
- U veegt 2x over het scherm van **rechts naar links** voor grafieken (1)
- U veegt 3x over het scherm van **rechts naar links** voor statistieken (2)
- Selecteer altijd de periode welke u wilt bekijken door de data aan te passen.
- Bij **grafieken** is de rode streep de met u afgesproken *bovengrens* en is de blauwe streep de *ondergrens*
- Bij **statistieken** ziet u het totaal aantal metingen per geselecteerde periode en het gemiddelde hiervan

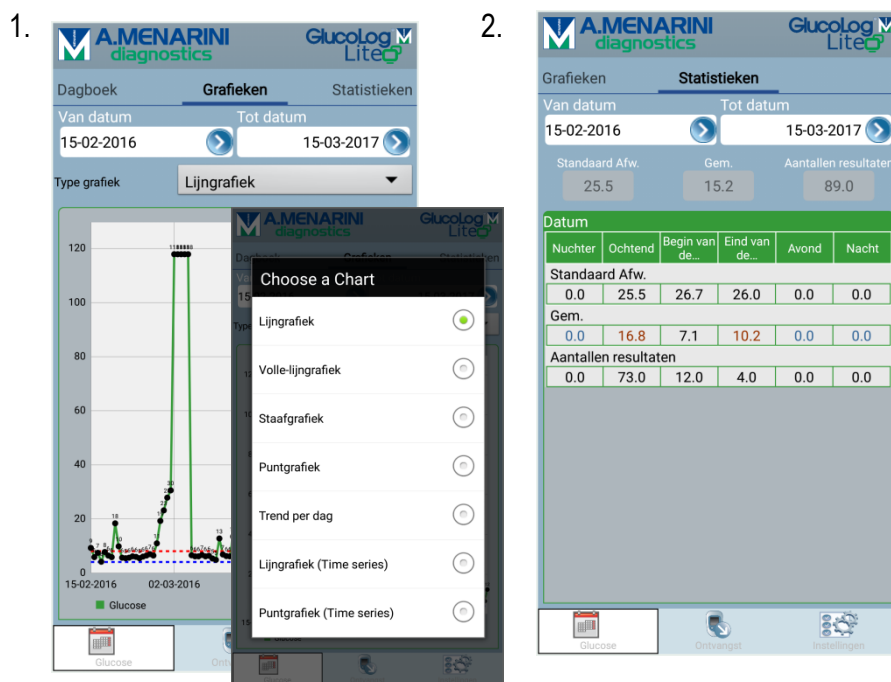

Zijn er nog vragen of onduidelijkheden dan kunt u ons tijdens kantooruren gratis bellen via telefoonnummer 0800-0225422 / keuze 1